



LIV[®] Midi 10 L CONOXIA[®] – medicinsk syrgas. En enkel och flexibel lösning för mobil gasterapi.



Enklare och säkrare LIV[®] (Linde Integrated Valve) är en smidig lösning för mobil gasterapi med integrerad ventil, regulator, snabbkoppling och flödesväljare (0–15 l/min) som gör anslutningen enkel och bekymmersfri.

Utloppstrycket i snabbkopplingen på LIV Midi 10 Liters gasflaska är 4,5 bar. Snabbkopplingen i ventilen ger möjlighet att vid behov koppla in annan medicinteknisk utrustning, t ex Hortons demand (gassparare för Hortonpatienter). Snabbkopplingen självstänger då man tar bort utrustningen.

Lättviktsflaskorna är tillverkade av aluminium. Den låga vikten gör LIV Midi 10 L enkel att lyfta, bära och hantera. LIV Midi 10 L gasflaska för CONOXIA väger ca 14,2 kg inkl. gas. CONOXIA är ett registrerat läkemedel, för mer information se FASS.se.

Aktiv manometer Den aktiva manometern visar hela tiden aktuellt tryck. Du kan därför enkelt se hur mycket gas som finns kvar utan att vrida på avstängningsventilen.

Förbrukningstabell och kort instruktion På LIV-flaskan finns en lättöverskådlig förbrukningstabell som visar hur länge gasen räcker beroende på inställt flöde och aktuellt tryck. Där sitter också en kort instruktion som enkelt sammanfattar handhavandet av LIV-flaskan.

Underhåll och spårbarhet Vid receptförskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt med streckkod på flaskan vilket garanterar full spårbarhet.

Produkten består av

- Integrerad kombinationsventil med tryckregulator, aktiv manometer, flödesväljare och snabbkoppling med fast tryck (4,5 bar)
- Ventilskydd med ergonomiskt bärhandtag
- 10 liters aluminiumflaska, fylld med CONOXIA
- MR-kompatibel, ≤ 3,0 T

- Tillbehör**
- Gasflaskkärra I för 1st 10 L gasflaska (art.nr. hos Linde Healthcare 308570)
 - Bygel med rem för 1 st 10 L gasflaska (art.nr. hos Linde Healthcare 301551)

Tillbehör finns att beställa hos Linde Healthcares kundcenter på tel 08-731 18 00.

Teknisk data

LIV Midi 10 L CONOXIA

Flaskstorlek	10,0 liter
Nominellt innehåll	ca. 2 120 liter
Material, flaska	Aluminium
Diameter, flaska	ca. 140 mm
Diameter, ventil	ca. 130 mm
Höjd inkl. ventil och skyddskåpa med sänghållare	ca. 1 070 mm
Vikt inkl. gas	ca. 14,2 kg
Ventil	LIV Midiflow
Max fyllningstryck	200 bar
Utloppstryck	4,5 bar
Garanterat flöde från snabbkoppling	≥ 180 liter per minut vid flasktryck 50–200 bar
Momentanflöde	> 200 liter per minut
Användningstemperatur	-20°C till +45°C
Förvarings-/transporttemperatur	-40°C till +65°C
Användaruttag	Slangnippel (6 mm utsida), flödesreglerad Snabbkoppling enligt NORDIC SS 8752430
Flödessteg	0, ½, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15 liter per minut
Gällande standard	EN ISO 10524-3
Varunummer hos Apoteket	15 41 41
Linde Healthcare artikelnummer	112696
Standard	CE-märkt. Integrerade ventiler är medicintekniska produkter, klassificerade enligt direktiv 93/42/EG

- Övrigt**
- MR-kompatibel, ≤ 3,0 T. Ventilen ska befinna sig minst 30 cm från magnetöppningen.
 - Restgasventil, RPV (Residual Pressure Valve).
 - Flaskan har plan botten.

Kontakta oss

Linde Healthcare kundcenter
healthcare.se@linde.com
Telefon 08-731 18 00

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se

Linde Gas AB
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se